

Установка и запуск ПО:

- 1) Установить на ПК Visual C++ Redistributable 2019
- 2) Установить последнюю версию DirectX
- 3) Скачать архив программы.
- 4) Распаковать архив в любое удобное место
- 5) Запустить XR-center.exe

Управление в симуляторе:

Управление:

- WASDQE – Перемещение

W - Вперед

A - Влево

S - Назад

D - Вправо

Q - Вниз

E - Вверх

- Зажать ПКМ (правую кнопку мыши) - Поворот камеры

Взаимодействия с интерфейсом при помощи нажатия ЛКМ (левой кнопкой мыши)

- Пригласить пациента в кабинет
- Сесть пациенту, если он в кабинете
- Встать пациенту посреди кабинета
- Встать пациенту посреди кабинета (руки за голову)
- Встать пациенту посреди кабинета (руки на груди)
- Лечь пациенту на левый бок
- Лечь пациенту на спину
- Лечь пациенту на правый бок

- Отправить пациента на обследования (пойдет сначала одеваться, если не одет)
- Отправить пациента одеться
- Отправить пациента раздеться
- Отправить пациента раздеться выше пояса
- Отправить пациента раздеться ниже пояса

Взаимодействие с интерактивными предметами (медицинскими приборами) на столе При помощи ЛКМ:

- Надеть СИЗ
- Взаимодействие с фонендоскопом
- Взаимодействие с тонометром
- Взаимодействие с пульсоксиметром
- Взаимодействие с глюкометром
- Взаимодействие с термометром

Взаимодействие с пациентом при помощи ЛКМ:

- Провести аускультацию (если взят фонендоскоп)

- Провести пальпацию (перейти в режим проведения пальпации)
- Провести перкуссию (перейти в режим проведения перкуссии)

Этапы симуляции:

Выбрать клинический случай

Пригласить пациента (окно на мониторе)

Провести осмотр пациента

На мониторе назначить диагноз, в соответствии с проведенным осмотром.

Назначить лечение.

Ознакомиться с оценкой прохождения симуляционной сессии.

ESC – Завершение симуляции